

Urisys® 1100 Analyzer – instructions d'installation pour la version logicielle 5.71:

Matériel nécessaire:

- puce contenant la version logicielle 5.71

Instructions:

1. Éteignez votre **Urisys® 1100**.
2. Déverrouillez le volet de l'imprimante en appuyant sur la surface à reliefs.



3. Retirez la puce insérée.



4. Insérez la puce contenant la version logicielle 5.71.
5. Allumez l'appareil.
6. L'appareil exécute automatiquement un auto-test.

Une fois l'auto-test terminé, le chariot se déplace hors de la position de démarrage et la barrette de retenue de la bandelette réactive s'ouvre. L'appareil imprime le texte «SELF CHECK OK» (AUTO-TEST OK) avec la date et l'heure sur la bandelette de papier.

7. La mise à jour rétablit les réglages standard sur le système.

Il vous faudra alors éventuellement de nouveau effectuer le réglage de la langue, des options de l'imprimante, de l'utilisation d'ID d'opérateur et de la transmission automatique des ID de patients et de données au PC ou à l'ordinateur hôte après la mise à jour. Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi en page 5/6.