

Bereich: Point of Care
August 2025

Anleitung zur Durchführung des Software Updates Version 3.0.0 für cobas® b 101

Die folgende Anleitung dient der Installation des Software-Updates Version 3.0.0 auf Ihrem **cobas® b 101**. Für das Software-Update benötigen Sie den im Schreiben beigelegten USB-Stick. Das Software-Update dauert ungefähr fünf Minuten.

Vorgang zur Installation der Software Version 3.0.0

Schalten Sie Ihr **cobas® b 101** Gerät ein.

Falls die Eingabe einer Benutzer-ID aktiviert ist, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert. Andernfalls können Sie das Gerät ohne Anmeldung betreiben.


Die Verwendung einer Benutzer-ID kann in den Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.




Tippen Sie im Hauptmenü auf dem Touchscreen auf **Setup**.




Tippen Sie auf **Optionen**.

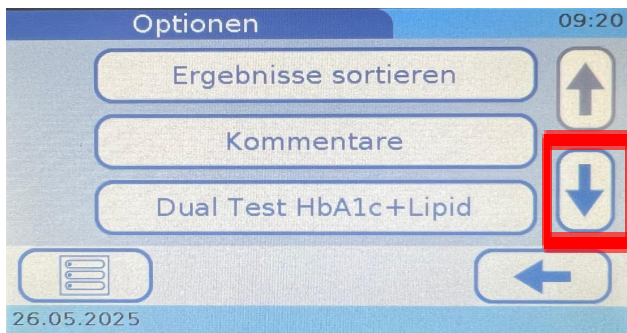


Tippen Sie auf den **Pfeil nach unten** bis "Service" erscheint.

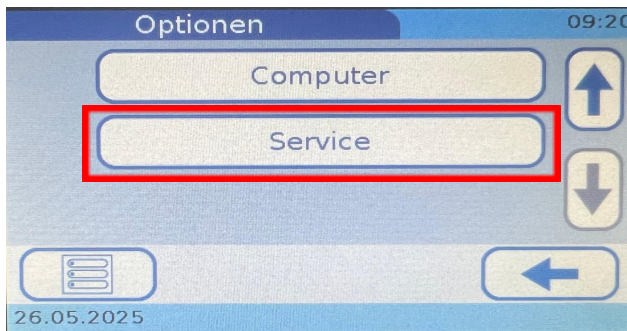


Tippen Sie auf **Service**.

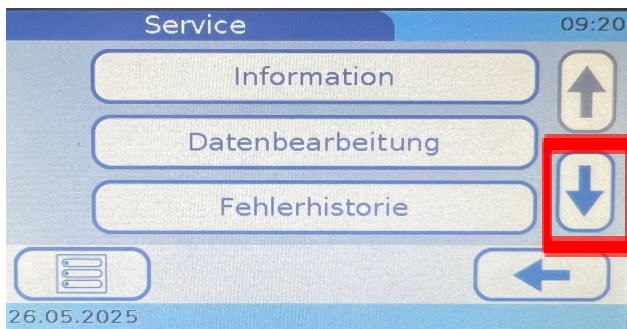

Tippen Sie auf den **Pfeil nach unten**.

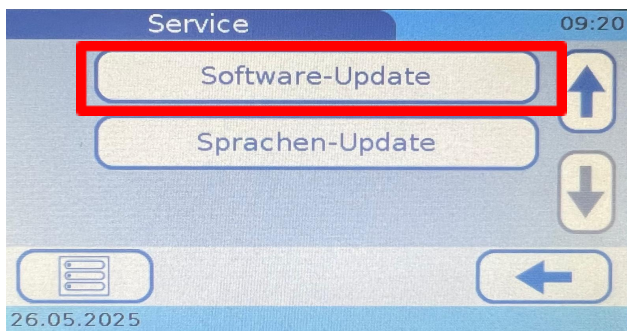


Wählen Sie **Software-Update** aus.

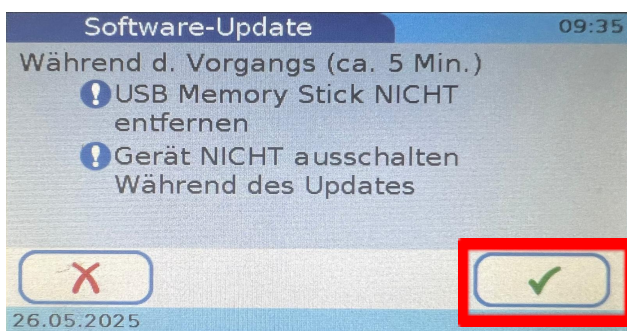


Tippen Sie auf **✓**.




Stecken Sie den USB-Stick in den **USB2-Anschluss** auf der Rückseite Ihres Gerätes.

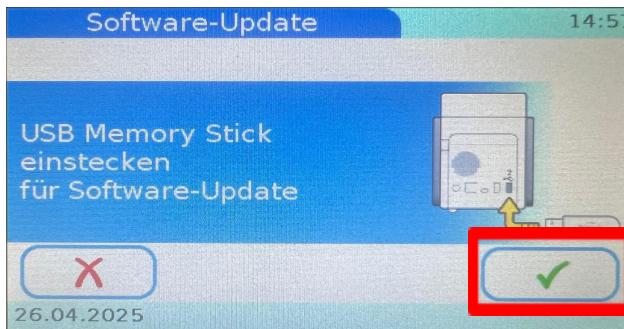


Tippen Sie auf ✓.

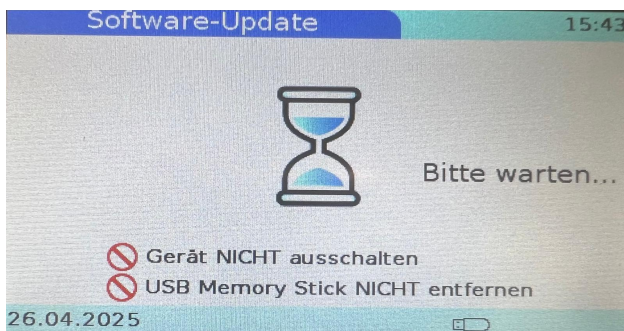

Das Gerät führt einige Prüfungen durch. Warten Sie, bis die Überprüfung der Software-Update Daten abgeschlossen ist.

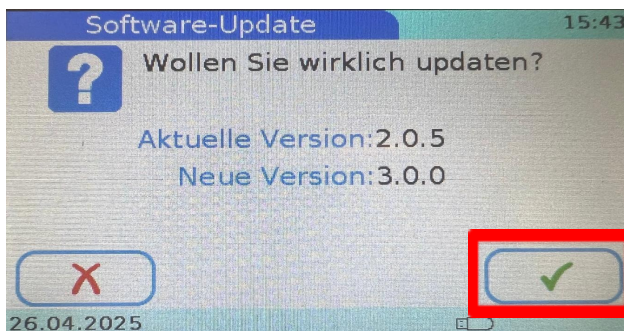

Tippen Sie auf auf ✓, um die Durchführung des Updates auf Version 3.0.0 zu bestätigen.

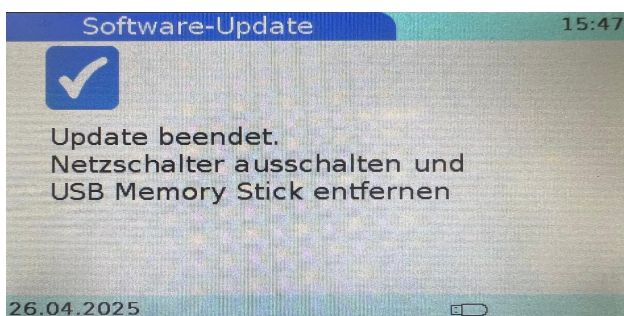

Sobald die Meldung "**Update beendet**" erscheint,

- schalten Sie den **cobas® b 101** aus,
- entfernen Sie den USB-Stick und
- schalten Sie den **cobas® b 101** wieder ein.

Das Software-Update auf Version 3.0.0 ist abgeschlossen.

Häufig gestellte Fragen

1) Gibt es Einschränkungen für das Installieren der Software Version 3.0.0?

Es gibt **keine** Einschränkungen für das Update auf Version 3.0.0. Sie können von allen älteren Versionen direkt auf die neue Version 3.0.0 aktualisieren.

2) Muss nach dem Software-Update etwas beachtet werden? Gibt es Veränderungen an der Benutzeroberfläche?

Nach dem Software Update kann das Gerät wie gewohnt genutzt werden. Die **Benutzeroberfläche bleibt unverändert**. Das Gerät ist nach dem Software-Update sowohl mit den Discs der 1. als auch der 2. Generation kompatibel.

3) Kompatibilität mit Drucker

Die neue Software Version 3.0.0 unterstützt neben den **aktuellen Druckermodele** auch das neue Modell **Citizen CT-E301** sowie einen **zusätzlichen Barcodescanner** (2D-Scanner Datalogic QD2590).

4) Welche speziellen Voraussetzungen gelten, wenn die Administratorrolle verwendet wird?

Das Update kann ohne Benutzeranmeldung am Gerät durchgeführt werden, sofern keine Benutzer-ID/Administratorrolle zugewiesen ist. Wenn aber die Administratorrolle aktiviert ist, müssen die Zugangsdaten des Administrators eingegeben werden, um das Update durchzuführen.

5) Schaltfläche „Software Update“ ausgegraut

Wenn die Administratorrolle auf dem **cobas® b 101** aktiviert ist und eine Benutzer-ID verwendet wird, die **kein** Administrator ist, wird die Schaltfläche „Software Update“ in der Benutzeroberfläche ausgegraut und ist nicht verwendbar.




Lösung: Bitte melden Sie sich erneut mit einer ID an, welche über die Administratorrolle verfügt.

Bei Fragen steht Ihnen unser **Customer Service Center** sowie der **Online Support** gerne zur Verfügung:

Customer Service Center: E-Mail: service.rotkreuz@roche.com, Tel. 0800 80 66 80

Online Support: support.roche.com

Roche Diagnostics (Schweiz) AG

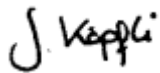

Sarah Köppli
Product Manager



Dr. Oliver Kawach
Head of Product Management