



wiroSPY TWIN



DOPPELKOPF STETHOSKOP



PREMIUM





wiroSPY TWIN



Produktbeschreibung

Marke	care & serve®
Kategorie	PREMIUM
Artikelbezeichnung	- care & serve® - PREMIUM wiroSPY TWIN Doppelkopf Stethoskop

MDR/PSA Verwendung

Verwendungszweck	Diagnosewerkzeug bei Untersuchungen zur Auskultation von Körpergeräuschen.
Anwendungsbereich	Zur Auskultation durch medizinisches Fachpersonal von Herz, Lunge, Abdomen, Halsschlagadern, Schilddrüse und peripheren Gefäßen oder der Blutdruckbestimmung durch die auskultatorische Methode.
Anwendungsgruppe	Die Verwendung ist auf entsprechend geschultes Personal beschränkt.
Patientengruppe	Stethoskope sind für alle Patientengruppen geeignet.
Indikation	Das Stethoskop ist für die Untersuchung von Patienten bestimmt. Die klinische Untersuchung von Patienten hat neben den immer weiter entwickelten technischen Methoden nach wie vor einen hohen Stellenwert. Sie umfasst die Auskultation von Herz, Lunge, Abdomen, Halsschlagadern, Schilddrüse und peripheren Gefäßen. Auch bei der Blutdruckbestimmung durch die auskultatorische Methode werden häufig Stethoskope eingesetzt.
Kontraindikation	Keine bekannten Kontraindikationen.
Hinweis	Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Arztpraxen



Material

Material	PP Aluminium Manganstahl PVC Zinklegierung Silikon
Gesundheitshinweis	Dieses Produkt enthält keine bekannten toxischen, karzinogene, mutagene, reproduktionstoxische oder auf andere Weise schädliche Substanzen oder Allergene. Der Kontakt mit der Haut kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen. Ziehen Sie das Produkt in diesem Fall unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorgaben aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Produktaufbau

1.	Ohrstöpsel
2.	Ohrbügel
3.	Feder
4.	Bruststück
5.	Y-Schlauch


Standards

CE-Kennzeichnung	Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroSPYTWIN-MN



Anwendung

Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 1 gültig ab Charge 2059 +
--------------------	--

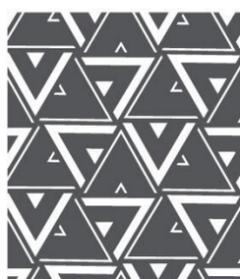



wiroSPY TWIN

Gebrauchsanweisung	<p>Vor dem Gebrauch Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Ohrstöpsel nicht verstopft sind und der Luftdurchfluss gewährleistet ist.</p> <p>Handhabung Richten Sie die Ohrstöpsel nach vorne und nicht nach hinten, wenn Sie sie in den Gehörgang einführen und achten Sie darauf, dass sie gut sitzen. Verwenden Sie das Stethoskop ausschließlich auf nackter Haut um Störgeräusche durch Kleidung zu vermeiden. Wärmen Sie das Bruststück ggf. mit Ihrer Handfläche vor Verwendung kurz vor. Achten Sie darauf, dass die Membran mit der Haut des Patienten während des Abhörens stetig in Kontakt bleibt. Setzen Sie dafür die Membran mit leichtem Druck auf. Tragen Sie den PVC-Schlauch nur über der Kleidung, nicht direkt auf der Haut.</p>	
Reinigung	<p>HINWEIS: Tauchen Sie Ihr Stethoskop nicht in Flüssigkeiten ein und setzen Sie es keiner Dampfsterilisation aus. Nehmen Sie während der Reinigung die Ohrstöpsel ab. Reinigen Sie das Stethoskop vor jedem Gebrauch gründlich. Das gesamte Stethoskop kann mit Alkohol oder milder Seifenlauge abgewischt werden. Wenn eine Desinfektion erforderlich ist, kann das Stethoskop mit einer 70%igen Isopropylalkohollösung abgewischt werden.</p>	
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.	
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.	
Lagerung	<p>Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.</p>	 

Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.	
------------------	---	---

WWW

PDF IFU	https://www.wiros.de/IFU/IFU-wiroSPY-TWIN.pdf
----------------	---

Variante 1

Verkaufseinheit	100 Stück/Karton				
Unterverpackung	1 Stück/Schachtel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe			
	75981412	blau			
	75981417	schwarz			
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene 1	Verpackungsebene 2	Karton
		UDI	UDI	UDI	UDI
	75981412	-----	4051642325040	-----	4051642825045
	75981417	-----	4051642325064	-----	4051642825069

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.
 Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.
 Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.

